



ABILIA

Nyheter PODD

Rolltalk Designer 2023-03-01

Rolltalk Designer for Print / Rolltalk Designer 10.5

Ändringar i körsystemet Rolltalk Designer 10.5 medför ändringar i Elektronisk PODD (Electronic PODD 15 v1.4.2, Electronic PODD 60 v1.4.1) samt Nova 2 v1.0.2

- Reviderat vokabulär för mer korrekt språk
- Byte av vissa symboler / ord
- Buggfix

Nyheter PODDböcker


- Revidering av vokabulär för mer korrekt språk användning
- Byte av vissa symboler / ord
- Levereras from 1 mars 2023





Gäller PODD12, PODD12 mini, PODD20, PODD20 mini, PODD40, PODD40 skola och PODD70

Nyheter i PODD utskriftsprogram v 1.4


- Nytt utseende
- Fler funktioner direkt på sidan under Ändra innehåll
- Möjlighet att byta ut aktiviteter
- Reviderat vokabulär för mer korrekt språk
- Byte av symboler
- Buggfixar

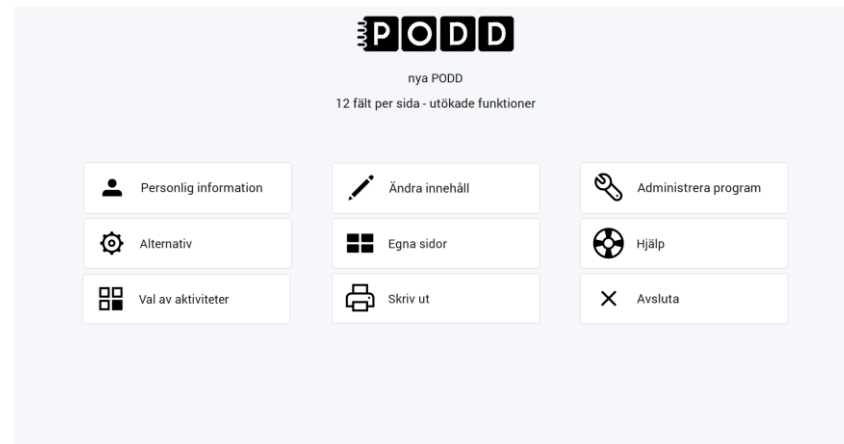

Nytt utseende

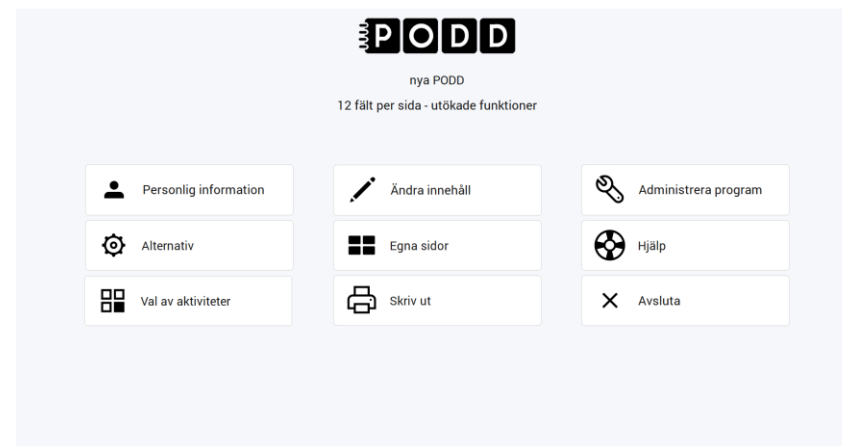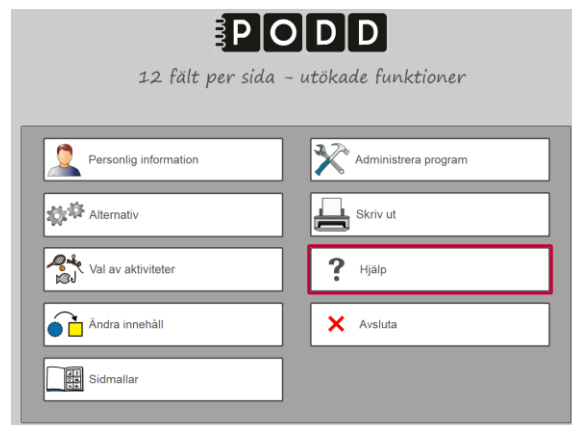

Fler funktioner i Ändra innehåll

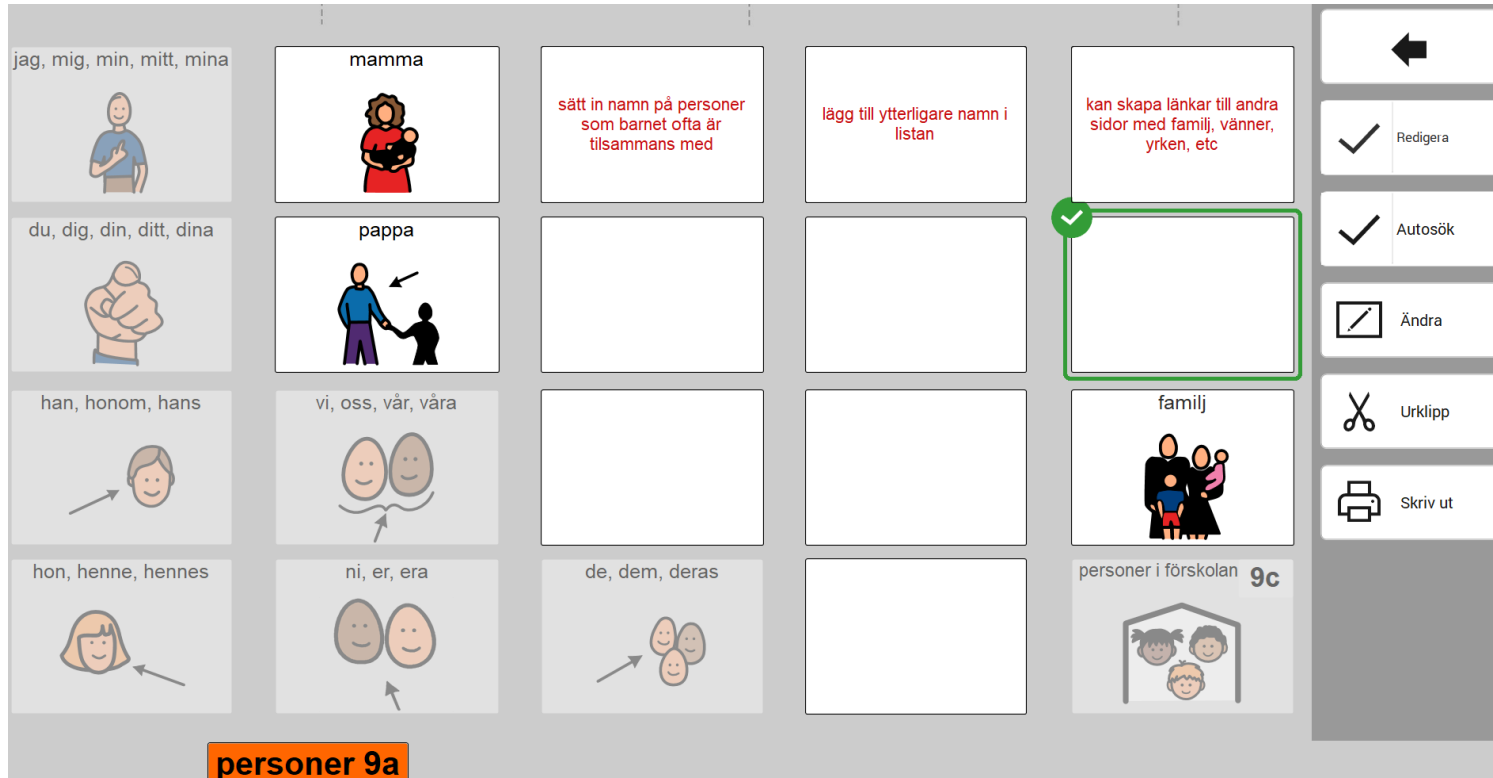

jag, mig, min, mitt, mina

du, dig, din, ditt, dina

han, honom, hans

hon, henne, hennes

mamma

pappa

vi, oss, vår, våra

ni, er, era

de, dem, deras

sätt in namn på personer som barnet ofta är tillsammans med

lägg till ytterligare namn i listan

kan skapa länkar till andra sidor med familj, vänner, yrken, etc

familj

personer i förskolan 9c

personer 9a

←

✓ Redigera

✓ Autosök

✎ Ändra

✂ Urklipp

🖨 Skriv ut

- **Autosökfunktion**

Sök efter symbol direkt i fältet.
Radera direkt i fältet.

- **Urklipp**

Flytta symboler på samma sida eller till en annan sida genom att klippa ut/ kopiera fältet.

- **Skriv ut**




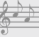
















Skriv ut den aktuella sida direkt från redigeringsidan.

Byta ut och sätta symbol på aktiviteter

- Möjlighet att byta ut de generiska aktiviteterna
- Vid val av annan daglig aktivitet (ej förskola eller skola) så kan man välja symbol och namnge aktiviteten.

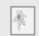←
Redigera

Välj för att använda ditt eget innehåll på aktivitetssidorna och avmarkera för att använda originalinnehåll.

<input type="checkbox"/>	TV 	<input type="checkbox"/>	klippa och klistra 	<input type="checkbox"/>	boll 
<input type="checkbox"/>	musik 	<input type="checkbox"/>	laga mat 	<input type="checkbox"/>	bygga 
<input type="checkbox"/>	bok, historia 	<input type="checkbox"/>	klossar 	<input type="checkbox"/>	vattenlek 
<input type="checkbox"/>	spel 	<input type="checkbox"/>	pussel 	<input type="checkbox"/>	klä ut 
<input type="checkbox"/>	modellera 	<input checked="" type="checkbox"/>	ridning 	<input type="checkbox"/>	kladdlek 
<input type="checkbox"/>	rita 	<input type="checkbox"/>	leksakerbilar 	<input type="checkbox"/>	dator 
<input type="checkbox"/>	måla 	<input type="checkbox"/>	såpbubblor 	<input type="checkbox"/>	

Autosök
 Ändra


25 Daglig aktivitet

Förskola

Skola

Annat

daglig verksamhet


Symbol
>


Reviderat vokabulär och byte av symbol/ ord

- Reviderat vokabulär för mer korrekt språk
- Byte av vissa symboler / ord som ansågs opassande




Uppdatering av PODD 1 mars 2023

- PODD-böckerna - samtliga
- PODD utskriftsprogram v 1.4
- Rolltalk Designer for Print / Rolltalk Designer 10.5
- Elektronisk PODD (Electronic PODD 15 v1.4.2, Electronic PODD 60 v1.4.1)
- Nova 2 v1.0.2

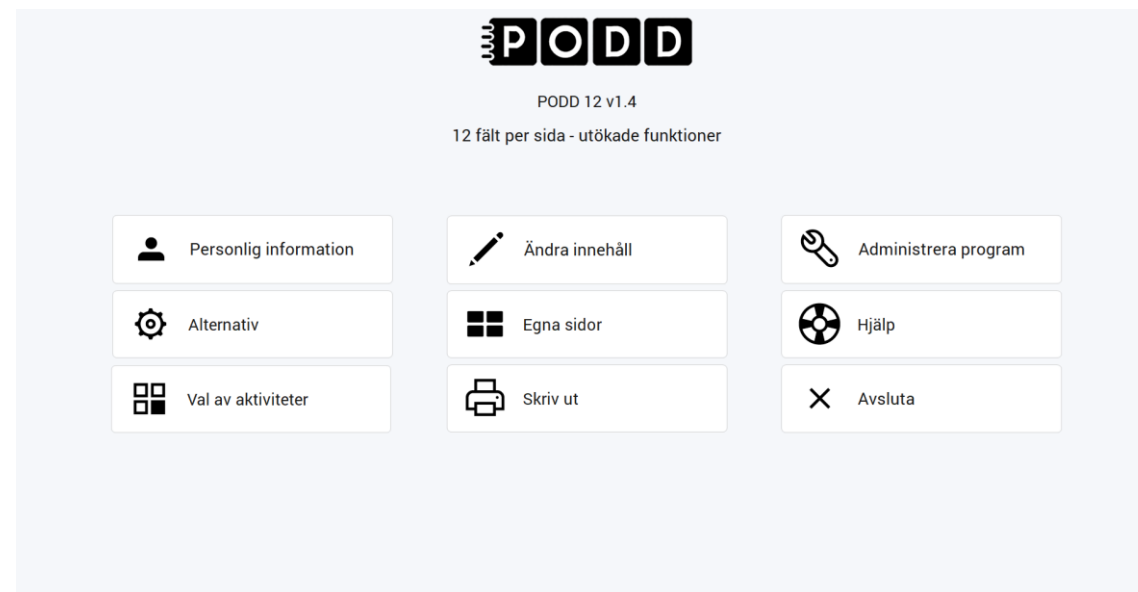

Uppdatering av nyheterna i PODD

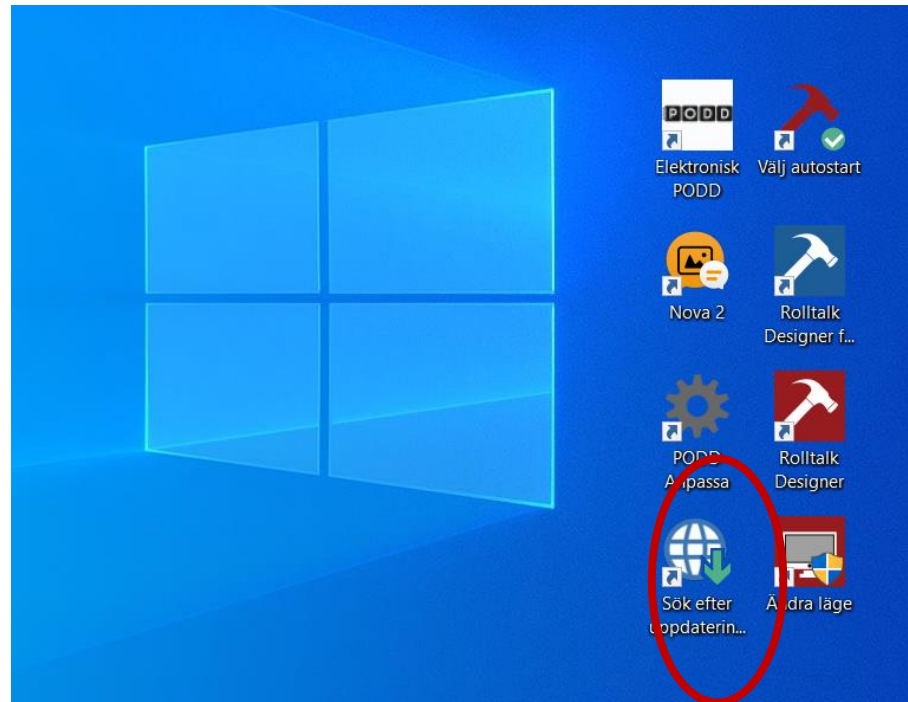

Dubbelklicka på
**Sök efter uppdatering-
ikonen** på skrivbordet

