

2022-04-21

## Ny version av GEWA SW

Vi vill informera om att det snart kommer en uppdatering av programvaran för GEWA One och GEWA Connect till version 3.4.

Planerad release för den nya versionen är under första veckan av maj.

## Nya funktioner och förbättringar i GEWA SW v.3.4

- I GEWA One finns telefon- och SMS-funktionalitet nu som en integrerad del av GEWA appen vilket gör dessa funktioner enklare att använda och mer ändamålsenligt när brukaren vill använda skanning med en manöverkontakt.
- Högtalaren i Multiboxen används inte längre utan allt ljud går via telefonenheten.
- Bluetooth-hörlurar kan nu kopplas till både GEWA One och GEWA Connect
- Telefonens högtalare är alltid förvald ljudkälla vid telefonsamtal. Om hörlurar är inkopplade kommer ljudet gå via hörlurarna.
- Skanning har förbättrats.
- Diverse förbättringar för att göra GEWA appen mer tillförlitlig och stabil



## Produkter som påverkas

GEWA SW finns i följande produkter:

- 461610 GEWA One, 3 år
- 461600 GEWA One, 5 år (utgått)
- 461188 GEWA Connect, 3 år
- 461180 GEWA Connect, 5 år (utgått)

I GEWA One finns det information om ny version i appens inställningar. Tryck på "Om" i "Inställningar". När det finns en ny version tillgänglig tryck på "Sök efter uppdateringar" och följ anvisningarna.

GEWA Connect används i egen mobiltelefon. Där beror det på vilken Androidinställning användaren har, om appar ska uppdateras automatiskt eller manuellt.

Med vänlig hälsning

Karin Winberg  
Anbuds- och avtalsansvarig