

2024-02-06

Nyheter i Handi-serien


Vi vill informera om följande nyheter i Handi-serien:

- Den 19 februari släpps en ny version av 706360 Handi5 SW som ger kompatibilitet med senaste Android-version.
- I april kommer hårdvaran för Handi One att bytas ut. Det innebär att den nya modellen 706540 Handi One G3 kommer att ersätta 706490 Handi One G2 som då utgår. Även 706541 Handi One+ G3 ("Plusmodellen" med telefonfunktioner) kommer att ersätta 706491 Handi One+ G2.

Handi5 SW v5.5

Detta är de viktigaste nyheterna i Handi5 SW v5.5:

- Programvaran har uppgraderats så att den nu fungerar på telefoner med Android 14.
- Handi-funktionerna Formulär och Spelaren är borttagna. Detta för att de kräver administration via PC-programmet HandiTools, vilket tyvärr inte fungerar med nyare Android-versioner.
- "Dubbeltryck" är borttaget, dvs man behöver inte längre trycka två gånger i menyer för att välja.
- Problem orsakade av inkompatibilitet är nu åtgärdade, t ex kring SMS och MMS.

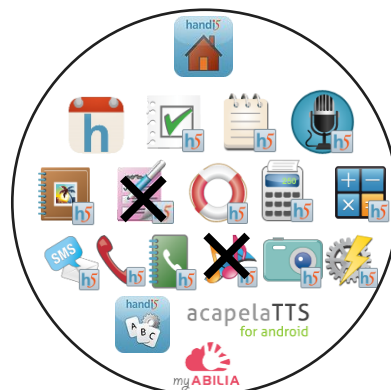

Handi5 SW installeras även fortsättningsvis via nedladdningsportal, se beskrivning i manualen.

OBS att det nu kommer att finnas två versioner av Handi5 SW att välja på:

- V.5.4 (den nuvarande) stödjer upp till Android 11.
- V.5.5 (den nya) stödjer Android 12 och uppåt.

Gör så här för att uppgradera till Handi5 SW v5.5

Den som idag har Handi5 SW v5.4 installerat på sin telefon ska göra så här för att uppgradera:

1. Ladda ned installationsfilen för v5.5 enligt beskrivningen i manualen.
2. Kör installationen. Nu ersätts v5.4 med v5.5.

Kunder som redan har Handi5 SW och telefon med Android 12 eller senare kan redan nu kontakta Abilias Service & Support för att få hjälpa att byta till Handi5 SW v5.5.


Handi One G3

Detta är de viktigaste nyheterna i *Handi One G3*:


- Modern Android-version.
- Är något större, tunnare och lättare än föregångaren.
- Levereras med skärmskydd och i ett tåligt plånboksfodral, då telefonen i sig inte är "ruggad".
- Innehåller Handi v5.5, dvs utan Handi-funktionerna Formulär och Spelaren samt "enkeltryck" i menyerna.

"Plusmodellen" har, precis som tidigare, telefonfunktioner samt möjlighet att installera appar via Google Play.

Handi One G3 levereras på samma sätt som tidigare med laddare, fodral, headset och utskrivna bruksanvisningar.

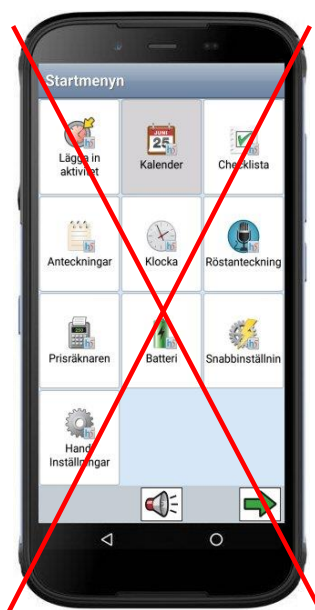

Handi One G2

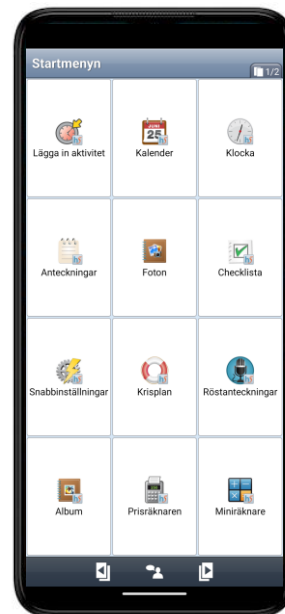

Handi One G3

Artikellista

Artiklar Handi One G2	Artiklar Handi One G3
706490 Handi One G2	706540 Handi One G3 - NY
706491 Handi One+ G2	706541 Handi One+ G3 - NY
706496 Fodral Handi One G2	706542 Fodral Handi One G3 – NY (ingår)
706492 Skärmskydd Handi One G2	706543 Skärmskydd Handi One G3 – NY (ingår)
706493 Batteriladdare – USB C	Samma (ingår)
706356 Headset 3.5 mm	Samma (ingår)

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig