



# Presentation av CARY Messenger

Ersättare till MEMOmessenger

2023-11-23

# Vad är CARY Messenger

En kalenderklocka med talade påminnelser och kompletterande portabelt stöd, som ger stöd att hålla reda på dygnet och på dagens händelser

Stationär enhet



Portabel enhet



## På båda enheterna kan man

- Se datum och tid
- Se dagens händelser (valbart om dagsplanen ska visas)
- Få informationen uppläst genom att trycka på skärmen
- Få visuella och auditiva påminnelser

På den stationära enheten administreras CARY Messenger, dvs här görs kalenderuppdateringar och anpassningar.

På den portabla enheten visas samma information som på den stationära enheten. Enheten är låst så att den endast kan användas som hjälpmedel.

Informationen synkroniseras trådlöst mellan enheterna. För detta krävs Wi-Fi och ett myAbilia-konto.

CARY Messenger kan även administreras på distans via **webbtjänsten myAbilia**.

# Jämförelse mellan CARY Messenger och MEMOmessenger

## MEMOmessenger



### Likvärdighet

- Tid- och datuminformation med talstöd i båda enheterna
- Talade påminnelser i båda enheterna
- Administration från den stationära enheten

### Förbättringar

- Större och bättre skärm, samt bättre ljud
- Översikt av dagens händelser
- Visuella påminnelser med text och bild
- Möjlighet till syntetiskt talade påminnelser
- Fjärradministration via myAbilia
- Modernt utseende

## CARY Messenger



CARY Mobile

# Så här fungerar CARY Messenger



## Stationär enhet\*



Anslut manöverkontakt för förenklad skärmuppläsning (tillbehör)



## Portabel enhet\*




## På båda enheterna

- Se datum och tid
- Se dagens händelser
- Få informationen uppläst genom att trycka på skärmen
- Få visuella och auditiva påminnelser


## Från den stationära enheten

- Gör Anpassningar, t ex välj skärminformation och indelning av dygnet
- Lägg in aktiviteter

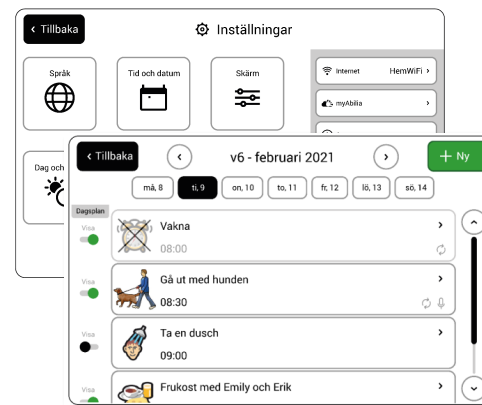

## Från webbtjänsten myAbilia

- Lägg in aktiviteter
- Lägg in egna foton i bildbiblioteket

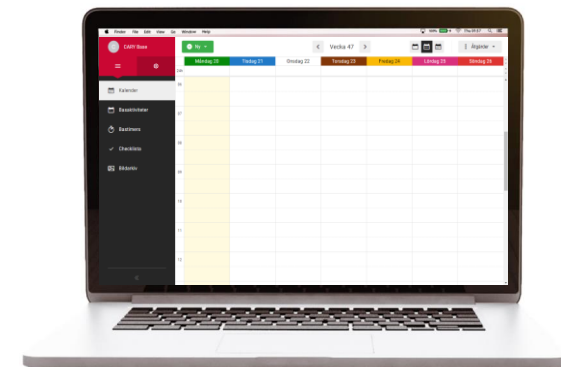


\* Anslutning till internet krävs för att enheterna ska vara synkroniserade

# Uppdatera kalendern i CARY Messenger


## Uppdatera direkt på den stationära enheten

- Ha kalenderfunktionen synlig eller dold
- Använd det inbyggda bildbiblioteket för att symbolisera händelser

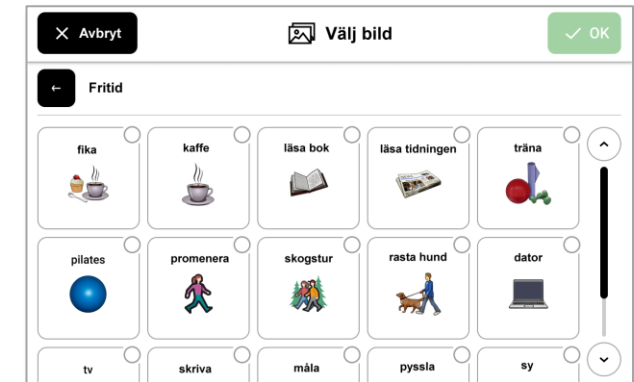


## Uppdatera via webbtjänsten myAbilia

- Uppdatera kalendern på distans
- Lägg in personliga foton

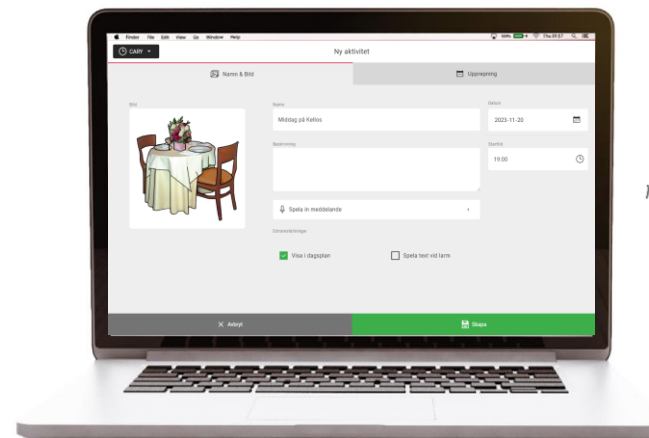

# Anpassa CARY Messenger

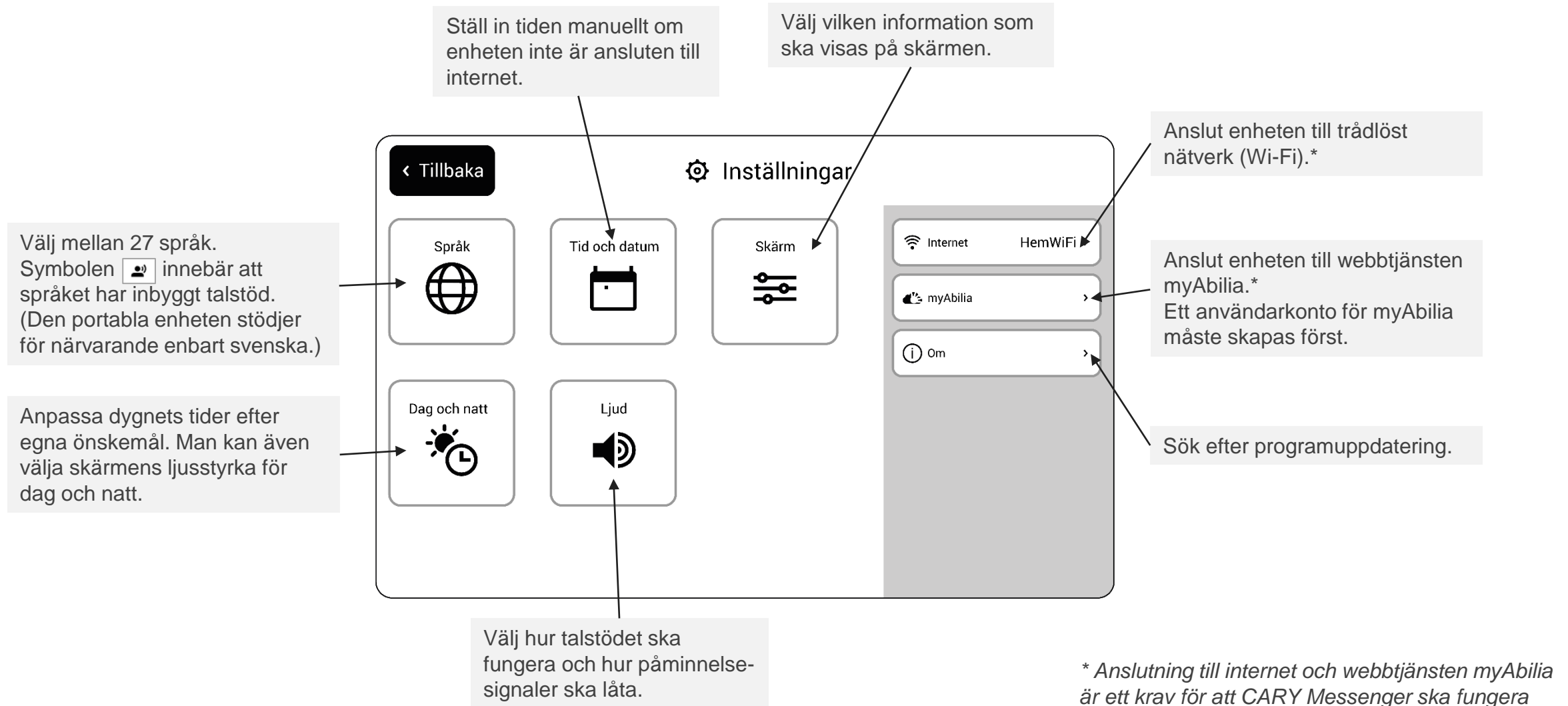

**Rätt hjälpmedel i rätt tid  
kan göra verklig skillnad**



Abilia AB | [www.abilia.se](http://www.abilia.se) | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | 08-594 694 00