

2023-02-22

Ny version av CARY Base

Vi vill informera om en kommande uppdatering av programvaran i CARY Base.

Artikel 508900 CARY Base kommer från och med 1 mars att levereras med programversion 1.3. Denna version finns då även tillgänglig för nedladdning direkt i produkten.

Nyheter i CARY Base v1.3

Vi har lyssnat på feedback från användarna och nu förbättrat funktionaliteten i CARY Base inom följande områden:

- **Förbättrad läsbarhet och tillgänglighet.** Större text på aktiviteter. Möjlighet att se dagens veckodagsfärg. Möjligt att dölja minutmarkeringarna på den analoga klockan. Både titel och beskrivning läses upp när man trycker på en aktivitet (och talstöd är valt).
- **Personliga bilder kan användas på enheten.** Bildarkivet i myAbilia visas nu på enheten när man väljer bild till aktivitet.
- **Fler inställningar för skärminformation.** Välj att dölja minutmarkeringar på den analoga klockan. Välj att visa veckodagsfärger.
- Rättningar och förbättrad prestanda.



CARY Base levereras på samma sätt som tidigare, med nätadapter och bruksanvisning.

En uppdaterad version av bruksanvisningen kan laddas ned från [Abilias Dokumentcenter](#).

[Läs mer om nyheterna här.](#)

Uppdatering av CARY Base

För att uppdatera CARY Base behöver enheten vara ansluten till internet.

Gå till **På/Av-menyn**, välj **Inställningar** och **Om**. Tryck på knappen "Sök efter uppdateringar" och följ instruktionerna.

OBS! Uppdateringen kommer denna gång att ta mer tid än vanligt eftersom den även innehåller uppdaterad firmware.

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig