



Ny programversion 1.4 till CARY-serien

Nyheter i programuppdatering v1.4

1. Mer anpassningsbara påminnelser

- Välj för vilka aktiviteter som ljudsignal ska ges
- Välj ljudsignalens längd
- Välj om påminnelser ska upprepas om de inte har bekräftats

2. Förhandsvisning av påminnelse

- Tryck på dagsplanen för att se en förhandsvisning av påminnelsen


3. Kontohantering direkt i CARY Base

- Skapa konto för att få tillgång till webbtjänsten myAbilia
- Bjud in stödpersoner till webbtjänsten myAbilia

4. Övriga förbättringar


- Välj om årtal ska visas
- Tydligare aktivitetsikoner

Ljudinställningarna har delats upp på två sidor:
Talstöd och Påminnelse

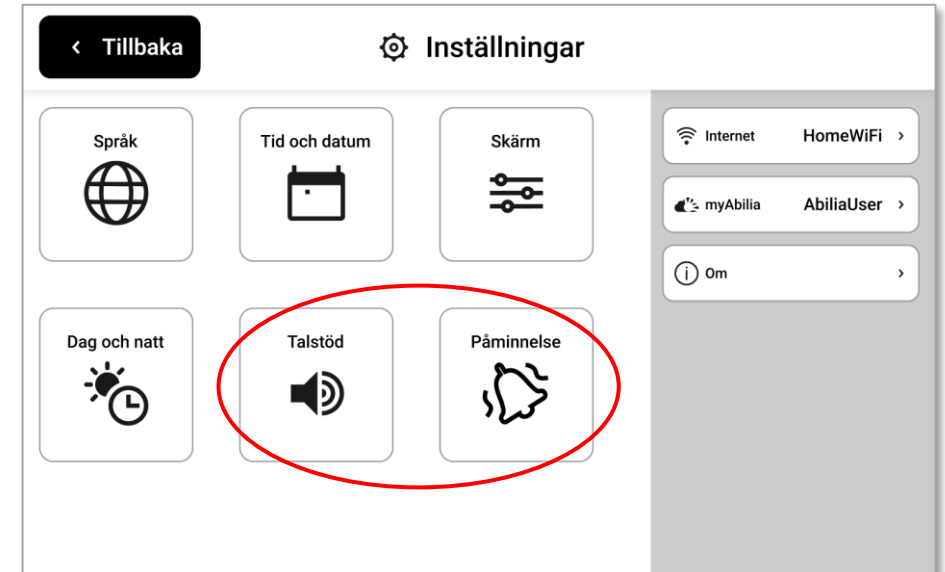

1. Mer anpassningsbara påminnelser

Nya inställningar för påminnelser

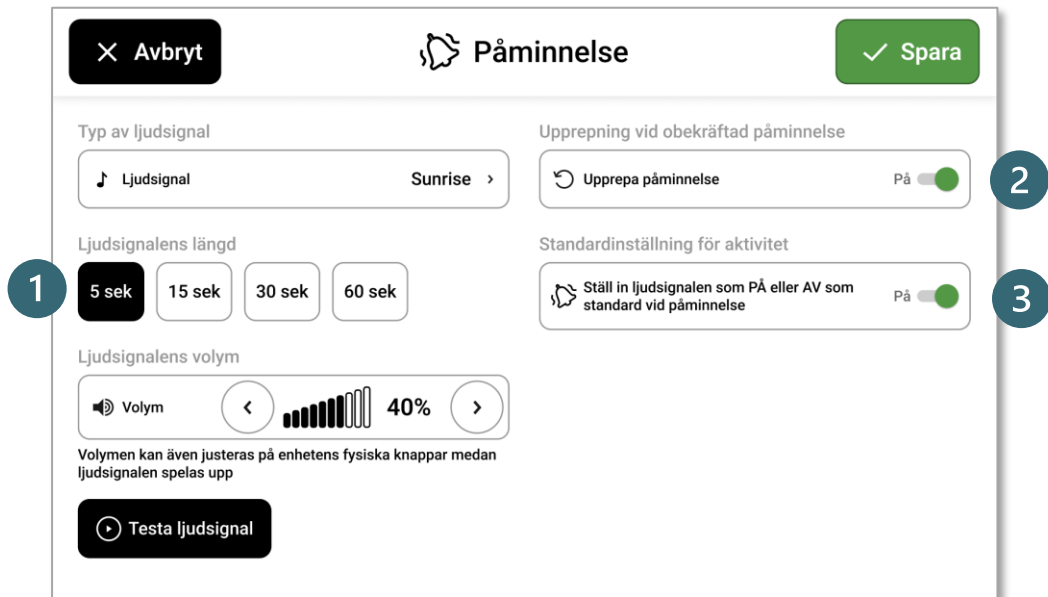

- 1 Välj hur länge signalen ska ljuda (standard 30 sekunder)
- 2 Välj om påminnelsen ska upprepas var 3:e minut när aktiviteten inte har bekräftats (standard på)
- 3 Välj om ljudsignal ska vara på som standard när man skapar ny aktivitet (standard på)

Välj ljudsignal av/på per aktivitet



- Välj Ljudsignal om det önskas för påminnelsen
- För att inte få ljud alls vid påminnelse: stäng av ljudsignal, textmeddelande och röstmeddelande

2. Förhandsvisning av påminnelser

Nu kan man trycka och hålla ned på en aktivitet i dagsplanen för att se en förhandsvisning av påminnelsen.

(För att få informationen i dagsplanen uppläst trycker man kort på aktiviteten, dvs på samma sätt som tidigare.)



3. Kontohantering direkt i CARY Base

Nu kan myAbilia-konto skapas direkt i CARY Base, och man kan även bjuda in stödpersoner. Guiden **Skapa konto** hjälper till med alla steg.



myAbilia


Användarnamn/E-post

Lösenord

Logga in

Har du inte ett myAbilia-konto? Klicka nedan för att skapa ett konto.

Skapa konto

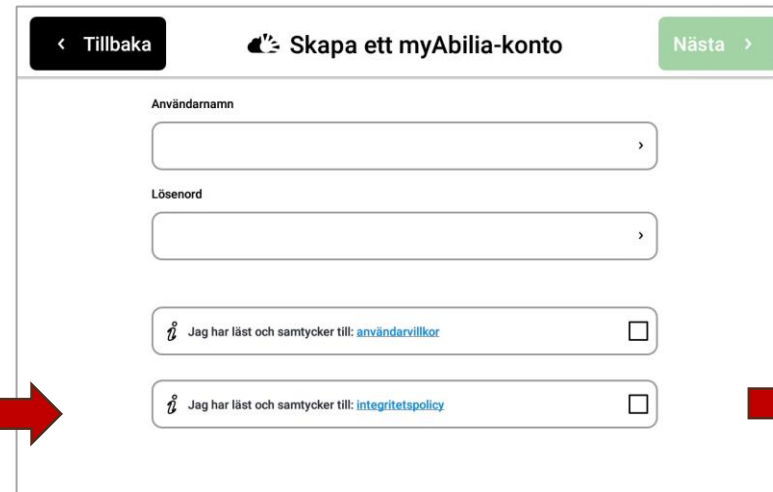

Skapa ett myAbilia-konto


Nästa

Användarnamn

Lösenord

Jag har läst och samtycker till: [användarvillkor](#)

Jag har läst och samtycker till: [integritetspolicy](#)

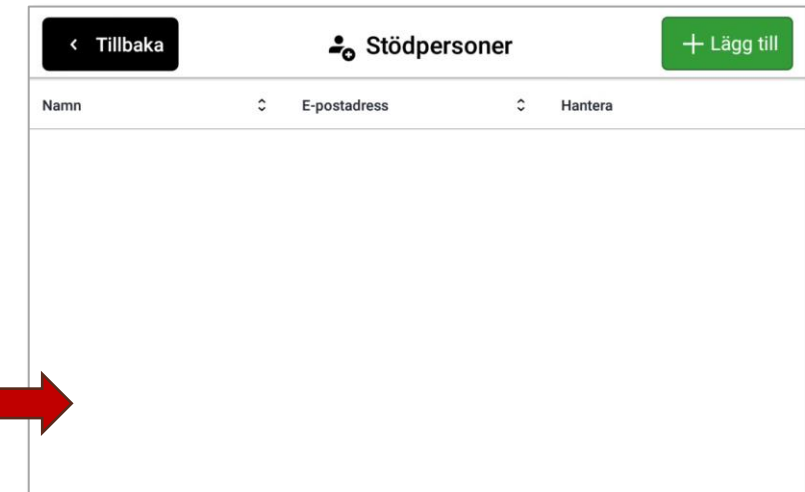

Stödpersoner

+ Lägg till

Namn	E-postadress	Hantera
------	--------------	---------

- Ange valfritt användarnamn och lösenord
- Koppla minst en kontaktuppgift till kontot (e-post eller mobilnummer) och verifiera med kod

- Lägg till stödpersoner (e-post) via guiden eller vid senare tillfälle
- De tillagda personerna får en inbjudan till myAbilia

4. Övrigt: Välj om årtal ska visas

Ny inställning: År



Datum visas nu utan årtal



- Välj om årtal ska visas (standard på)

4. Övrigt: Tydligare aktivitetsikoner



Ikonen för återkommande aktivitet visas nu endast i kalendervyn



Ny ikon som indikerar ljudsignal i samband med påminnelse



Ändrad ikon för talat meddelande i samband med påminnelse



**Rätt hjälpmedel i rätt tid
kan göra verklig skillnad**



Abilia AB | www.abilia.se | info@abilia.se | 08-594 694 00