

2024-10-11

Ny programversion till CARY-serien

Vi vill informera om en kommande uppdatering av programvaran i CARY-serien.

Artiklarna *508900 CARY Base* och *508940 CARY Messenger* kommer från och med 5 november att levereras med programversion 1.4. Denna version finns då även tillgänglig för nedladdning direkt i produkten.

Nyheter i programversion 1.4

Vi har lyssnat på feedback från användarna och nu förbättrat funktionaliteten inom följande områden:

- **Mer anpassningsbara påminnelser.** Nu kan man välja för vilka aktiviteter som ljudsignal ska ges, hur länge signalen ska ljuda, samt välja om påminnelser ska upprepas om de inte bekräftats.
- **Förhandsvisning av påminnelser.** Nu är det möjligt att trycka på aktiviteter i dagsplanen för att få förhandsvisning av hur påminnelsen kommer att se ut.
- **Kontohantering direkt i CARY Base.** Nu kan myAbilia-konto skapas direkt i CARY Base och man kan även bjuda in stödpersoner.



CARY Base och CARY Messenger levereras med uppdaterade bruksanvisningar, men för övrigt med samma innehåll som tidigare. Senaste version av bruksanvisningarna kan laddas ned från [Abilias Dokumentcenter](#).

För mer utförlig information, se det bifogade bildspelet (pdf).

Uppdatering av CARY Base och CARY Messenger

För att uppdatera CARY behöver enheten vara ansluten till internet.

Gå till **På/Av-menyn**, välj **Inställningar** och **Om**. Tryck på knappen "Sök efter uppdateringar" och följ instruktionerna.

OBS! Uppdateringen kommer denna gång att ta mer tid än vanligt eftersom den även innehåller uppdaterad firmware.

Med vänlig hälsning

Karin Winberg
Anbuds- och avtalsansvarig